


MANUAL DEL USUARIO

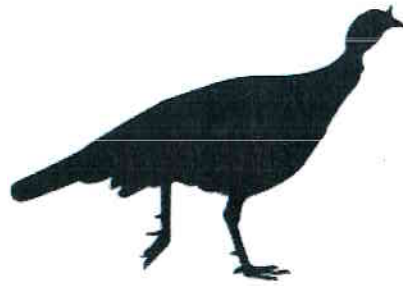

TED

Aturdidor con Pasador Cautivo



bock industries, inc.

Esta herramienta es para eutanasia animal

Usuarios Autorizados Solamente

SIEMPRE apunte en dirección segura.

Quando Llegue TED.... Inmediatamente



Seguridad Primero

1. Lea este Manual de Usuario



2. Cargue las Baterías



3. Compre Combustible, aceite (Paslode) y Aceite en Spray (Triflow)



I
N
S
P
E
C
C
I
O
N

Observe la ubicación empacada de los componentes.

Seguridad Primero



I
N
S
P
E
C
C
I
O
N


AC

120v

Adaptador

Recomendación

Usar Lentes de Seguridad

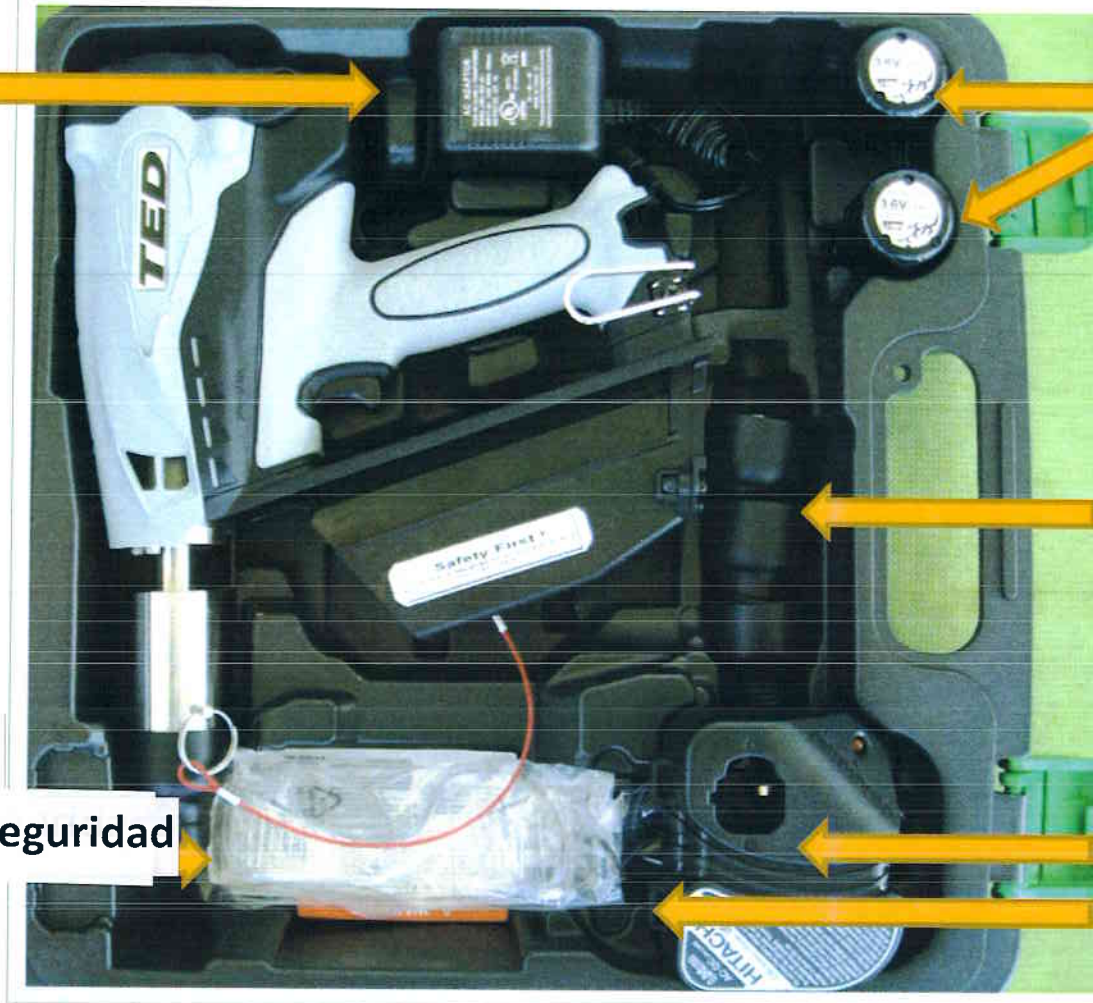

Baterias

(Cargue antes de usar)

Tema de
Adaptadores

Base de Cargar

DC

12v

Adaptador

Lea el Manual Hitachi

Seguridad Primero



I
N
S
P
E
C
T
I
O
N



TED con el Pasador de Seguridad en sitio



Seguridad Primero

I
N
S
P
E
C
C
I
O
N

Gatillo

LED
Verde: listo
Rojo: Cargar batería

Pasador de Seguridad

Activador

Adaptador para el sujeto




Pasador de Seguridad para cerrar mecánicamente al TED



Seguridad Primero

I
N
S
P
E
C
C
I
O
N

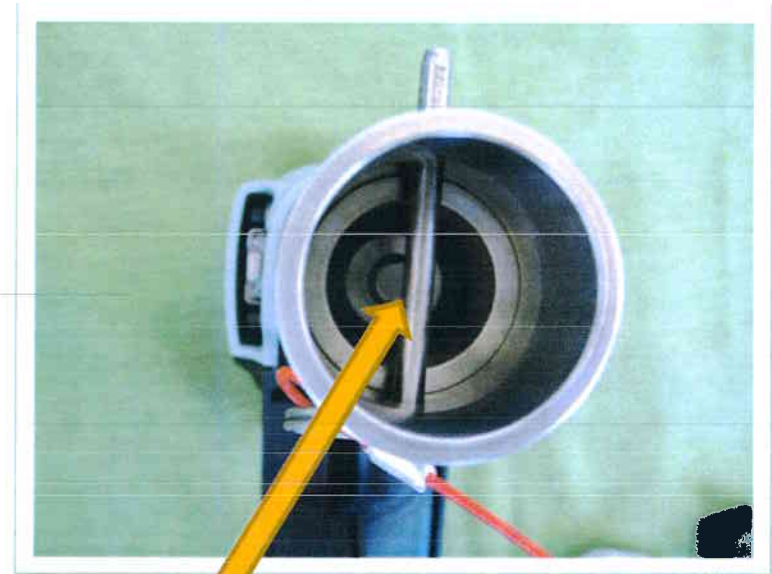

Pasador de Seguridad
Restrinje el movimiento del Activador

Pasador de Seguridad almacenado en TED



Seguridad Primero!

I
N
S
P
E
C
C
I
O
N



Pasador de Seguridad



Adaptador de Sujetos determina el Pasaje del Impacto



Seguridad Primero!



- Adaptador del Sujeto #1 maximo Pasaje del Impacto, >45 lbs.
- Adaptador del Sujeto #2 disminuira el Pasaje del Impacto pr 1/8", 25-40 lbs.
- Adaptador del Sujeto #3 disminuira el Pasaje del Impacto por 1/4", 15-20 lbs.
- Adaptador del Sujeto #3r disminuirá el Pasaje del Impacto por 1/4", <15 lbs.



M
O
N
T
A
J
E


Empuje el Adaptador de Sujeto hacia el Activador sobre el O-Ring



Seguridad Primero!



M
O
N
T
A
J
E

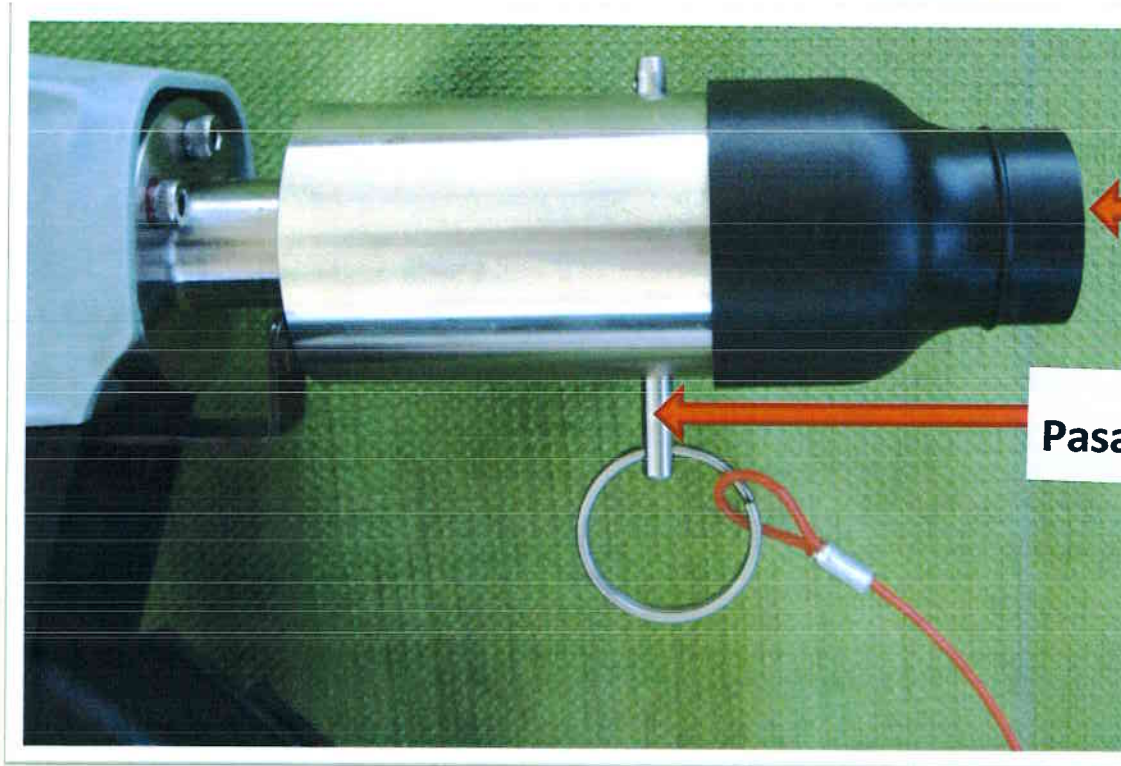

Adaptador de Sujeto


Pasador de Seguridad

Coloque la valvula de medir en una nueva lata



Seguridad Primero!

Empuje #2 Empuje #1

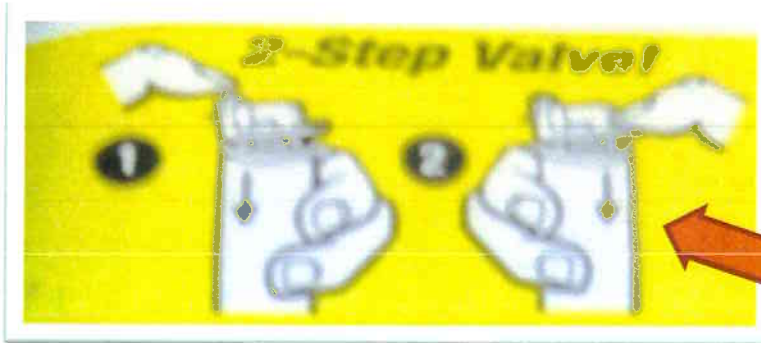

- -Una vez colocado hacia abajo, no trate de remover la valvula de medir.
- La valvula de medir permanecerá colocada hacia abajo durante la vida de la lata.
- La lata suministra 1000 aturdidadas (aprox.)
- Etiquete la lata y registre el numero de aturdidadas.



M
O
N
T
A
J
E

La boquilla blanca se desliza y presionar en el receptor negro.



Seguridad Primero!

M
O
N
T
A
J
E

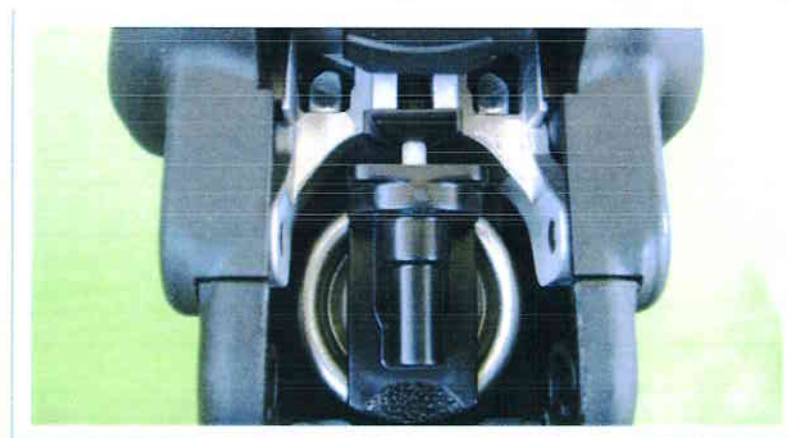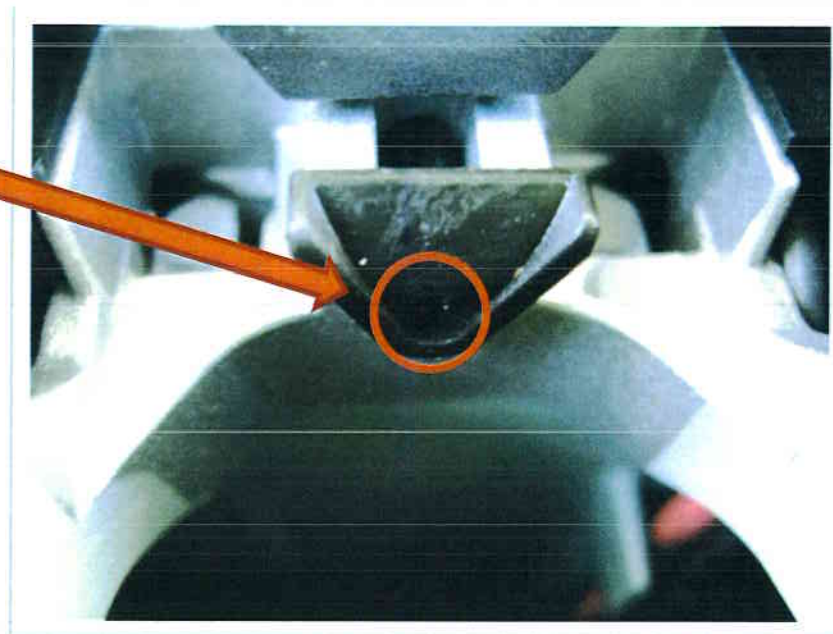

Baterias y equipo de cargar



Seguridad Primero!

M
O
N
T
A
J
E



Cierre de Bateria



- LED verde: listo
- LED rojo: cargar batería

Aceitar el Pasador Cautivo



Seguridad Primero!



1. Se recomienda aceite en espray en el Portal de Ventilacion
2. Espray dos veces en descargas de dos segundos.



M
O
N
T
A
J
E



Asegurece que el sistema de combustible sea cebado.

Seguridad Primero!


- El TED pudiese **NO** disparar en el primer intento, inmediatamente después de cargar la lata de combustible. Esto es **NORMAL**.
- Cebar la entrega del combustible al disparar el TED en seco varias veces.
 1. Instale la lata de combustible y la batería.
 2. Remueva el Pasador de Seguridad del Activador.
 3. Apriete el Activador sobre un pedazo de carton.
 4. Escuche el sonido del abanico de arranque interno.
 5. Apriete el gatillo.
 6. Repita desde el tercer paso, varia veces para confirmar la operación.

**M
O
N
T
A
J
E**

Escoja al sujeto: En el centro entre los oídos y la parte trasera del ojo.



Seguridad primero!

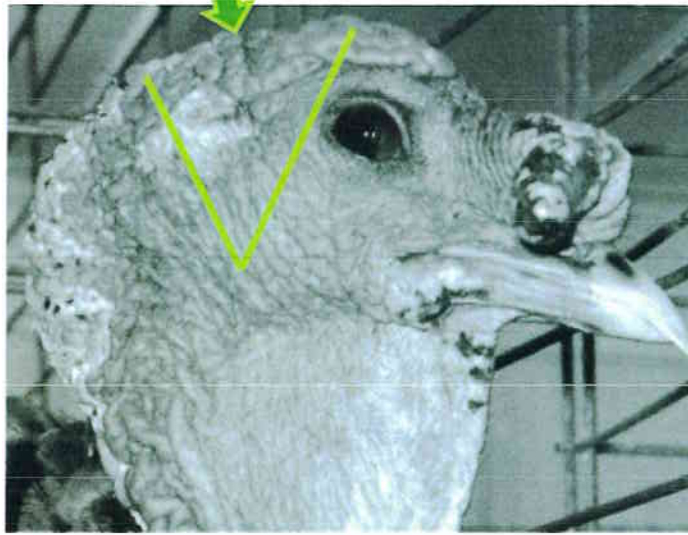


U
S
A
R

Remueva el Pasador de Seguridad del Activador (y guárdelo).



Ubique el TED sobre el sujeto como en la foto. Apriete el TED hasta que el Activador haga contacto con los tornillos de la tapa.

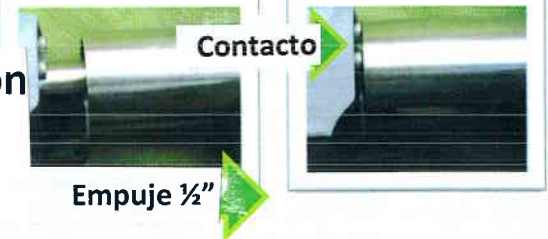

Inmediatamente apriete el gatillo.

Reemplace el TED del sujeto para permitir el reciclaje.

Nota: El Activador resetea, las ventilas auditivas del abanico en la cámara de combustión.

<1


Segundo

TED es reseteado e inmediatamente se alista para la próxima aturrida.



Si el Pasador Cautivo no pasa su ciclo completo use el Pasador de Ubicación.

Seguridad Primero!

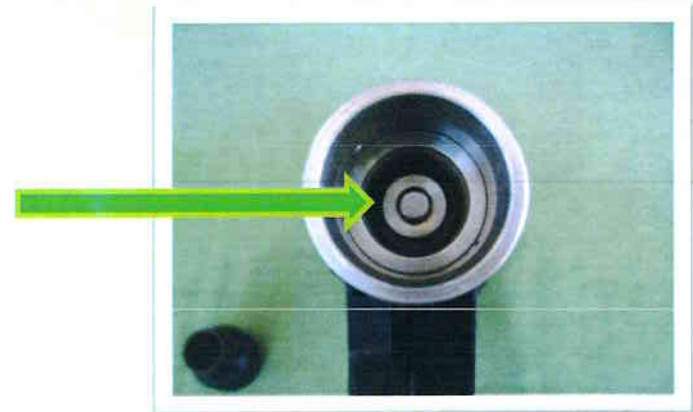

U
S
A
R

- El Pasador Cautivo tiene que estar retractado completamente para que el TED dispare.
- Durante el embarque o transporte el pasador se pudiera mover de la posición de comienzo.
- Use el Pasador de Ubicación para suavemente empujar el Pasador en la posición de comienzo. Observe resistencia cuando se llega a la posición de comienzo.



Se recomienda limpieza diaria y aceite

Seguridad Primero!



M
A
N
T
E
N
I
M
I
E
N
T
O

1. Remover la batería y la lata de combustible.
2. Limpie el aturdidor con desinfectante.
3. Aplique varias gotas de aceite liviano a la parte interna del Activador.
4. Aplique aceite de spray al portal de ventilación.
5. Activador de Ciclo para confirmar una operación fluida.
6. Inserte el Pasador de Seguridad en el Activador.



Portal de ventilación




Limpeza Profunda del TED



Seguridad Primero!

1. El reciclaje del Pasador Captivo pudiera atraer contaminación hacia el TED.
2. Ubicar el pequeño portal de ventilación mostrado abajo.

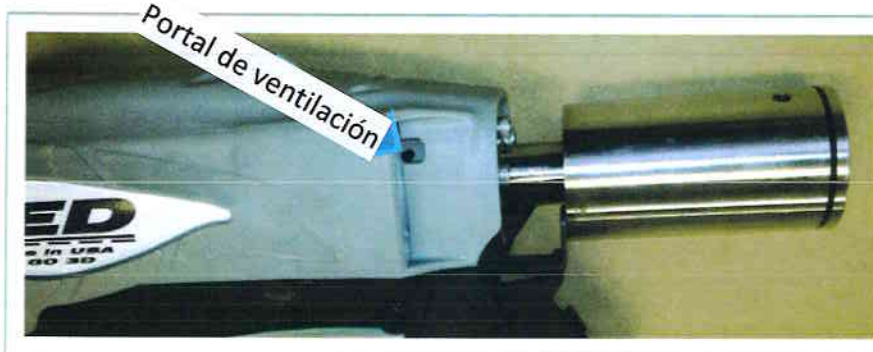

3. Echar desinfectante en el portal de ventilación.
4. "Dispare en seco" el TED para forzar el desinfectante por los componentes internos.
5. Echar aceite en espray en el puerto de ventilación.
6. "Dispare en seco" el TED para distribuir aceite a los componentes internos.

M
A
N
T
E
N
I
M
I
E
N
T
O

Exponiendo el Pasador Cautivo para poderlo limpiar.

Seguridad Primero!

M
A
N
T
E
N
I
M
I
E
N
T
O

1. Asegurece que la batería y la lata de combustible se hallan quitado.

2. Remueva el Adaptador del Sujeto del Activador.



3. Decienda el Pasador Cautivo sacudiendo forzadamente el TED en dirección del viaje del Pasador Cautivo.

4. Repita el sacudir hasta que el Pasador Cautivo sea visible.

5. Limpie y desinfecte el Pasador Cautivo expuesto.

6. Use el Pasador de Ubicación para regresar el Pasador Cautivo de vuelta en la posición de comienzo.



Entrelazar la seguridad

Seguridad Primero!



M
A
N
T
E
N
I
M
I
E
N
T
O

1. El Pasador Cautivo completamente retractado (usar el Pasador de Ubicación).



2. Colocar la lata de combustible en sitio (confirme suficiente nivel).

3. Bateria colocada en sitio (confirme suficiente carga).

4. Pasador de Seguridad removido del Activador.

5. Activador completamente bajado.



6. Confirme el LED en verde.



Combustible Compatible: Preferido Paslode

Seguridad Primero!



M
A
N
T
E
N
I
M
I
E
N
T
O

amazon.com Hello. Sign in to get personalized recommendations. New customer? Start here
Your Amazon.com Today's Deals Gifts & Wish Lists Gift Cards
Shop All Departments Search Everything Else

Combustible Paslode 650039

by Paslode
Be the first to review this item | Like (0)

Price:

In Stock.
Ships from and sold by cco9.

3 new from

amazon.com Hello. Sign in to get personalized recommendations. New customer? Start here
Your Amazon.com Today's Deals Gifts & Wish Lists Gift Cards
Shop All Departments Search Tools & Home Improvement

Home Improvement Best Sellers Brands Lamps & Light Fixtures Kitchen & Bath Fixtures Building Supplies

Bobstich 9B12062R color amarillo

Be the first to review this item | Like (0)

List Price:
Price:
You Save:

In Stock.
Ships from and sold by Deerso.

7 new from

amazon.com Hello. Sign in to get personalized recommendations. New customer? Start here
Your Amazon.com Today's Deals Gifts & Wish Lists Gift Cards
Shop All Departments Search Tools & Home Improvement

Home Improvement Best Sellers Brands Lamps & Light Fixtures Kitchen & Bath Fixtures Building Supplies

Hitachi 728981 0.6 onzas varillas de corto combustible.

by Hitachi
Be the first to review this item | Like (0)

Price:

In Stock.
Ships from and sold by Quality Distributing LLC.

Only 4 left in stock - order soon.

3 new from

Aceite Compatible

Seguridad Primero!



M
A
N
T
E
N
I
M
I
E
N
T
O

